

Scar Reduction Gel 疤痕凝胶

·改善疤痕·抑制增生性瘢痕·

科学配方；温和亲肤；无覆盖更透气



- ✓ 外伤疤痕
- ✓ 烧伤疤痕
- ✓ 手术疤痕



疤痕凝胶

生产企业名称：威海美迪森医疗器械股份有限公司
生产许可证编号：鲁食药监械生产许20130088号

生产地址：威海市环翠区羊亭镇曲家河工业园
医疗器械注册证编号：鲁械注准20212140526



产品信息

【产品名称】疤痕凝胶

【产品型号】MDS-QBNJ01


【规格】10g/支、20g/支

【产品组成结构】

本品的主要成分为聚二甲基硅氧烷和聚二甲基硅氧烷-乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物。本品为软管或挤压瓶包装。产品以非无菌形式提供。

产品主要性能

- 本品外观为透明无色的凝胶状，质地均匀，清洁无杂质。
- 耐寒：-15℃，24小时，恢复至室温后膏体无油水分离现象。
- 耐热：40℃，24小时，恢复至室温后膏体无油水分离现象。
- 粘度：粘度应不小于1000mPa·s。

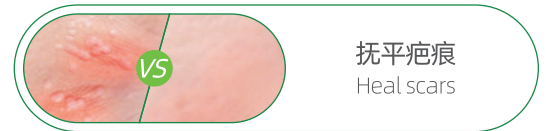

适用范围：


本品适用于处理已愈合伤口和未受损伤皮肤上的增生性瘢痕和瘢痕疙瘩（如由一般外科手术、外伤和烧伤导致的此类疤痕），有助于疤痕情况的改善。本产品不适用于陈旧性瘢痕。

使用说明：

- 清洗疤痕部位，并使其干燥。
- 取本品适量在疤痕上涂抹，用指腹在疤痕处反复按揉直至干燥即可。
- 一日两次，早晚各一次。
- 本品请在专业人士指导下使用。

禁忌症：

- 不能用于未愈合伤口和破损皮肤上的疤痕情况。
- 对产品成分过敏者禁用。

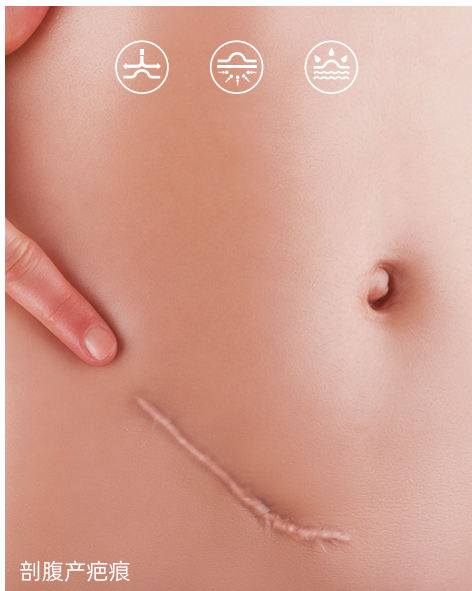

注意事项、警示及提示性说明

- 仅限于外用。
- 未愈合的伤口不适合使用。
- 避免直接接触眼睛，分泌黏液膜，第三度烧伤及未愈合的伤口上。如不慎接触立即用大量清水冲洗。
- 勿与外用抗生素或其他皮肤外用药物在同一部位使用。
- 如发现包装破损，禁止使用。
- 过期产品禁止使用。
- 如出现副作用如有皮肤发红，疼痛和刺激，请立即停用。如出现副作用，请咨询医生。
- 产品开封暴露后请在6个月使用完毕。

适用科室

甲状腺、妇产科、整形科、儿科、外科等全科室。