
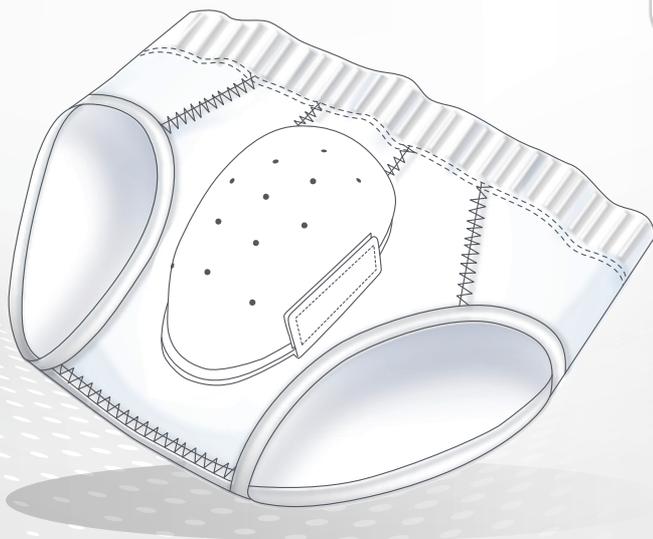


外生殖器术后 可开合式 保护罩

Optimum protection after circumcision

- 术后伤口保护, 促进愈合
- 不黏住织物或撕裂伤口
- 缓解疼痛, 不再担心伤口受外部的影响
- 降低炎症的风险
- 空气通过保护罩自然流通

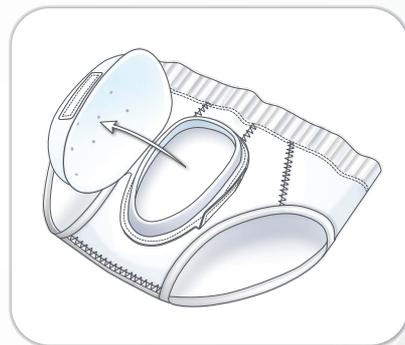

专利号 (Patent No) :
ZL 201430507748.1 ZL 201420762826.7
ZL 201430507859.2 ZL 201420762909.6

外生殖器术后保护罩

生产企业名称: 威海美迪森医疗器械股份有限公司
售后服务单位: 威海美迪森医疗器械股份有限公司

总经销: 上海修智商务有限公司 电话: 021-58399808
生产地址: 威海市环翠区羊亭镇曲家河工业园



产品信息

- 【产品名称】外生殖器术后保护罩
 【规格型号】儿童：C-S、C-M、C-L、C-XL，成人：A-S、A-M、A-L
 【医疗器械备案编号】鲁威械备20190014号
 【生产备案编号】鲁威食药监械生产备20150017

性能指标

1. 拉力：不小于10N。
2. 抗冲击强度：在1.96J的能量下产品不被破坏。
3. 抗挤压性能：邵氏硬度≥50。

使用方法

1. 使用前根据患者体形选择合适的产品尺寸。
2. 将产品展开后，将产品从双腿由下往上拉到穿戴的位置。
3. 在经过手术部位时，将产品短裤部分拉开拉大，以让过手术部位。
4. 最后固定好合适的位置。



规格型号


儿童: C-S型	儿童: C-M型	儿童: C-L型	儿童: C-XL型	成人: A-S型	成人: A-M型	成人: A-L型
年龄: 3~5岁	年龄: 6~9岁	年龄: 10~12岁	年龄: 13~16岁	身高: 170cm	身高: 175cm	身高: 180cm
体重: 13~19kg	体重: 19~32kg	体重: 32~45kg	体重: 45~60kg	体重: 60~75kg	体重: 75~90kg	体重: 85~100kg

适用范围


用于男性外生殖器术后，保护手术部位不被挤压，不接触伤口。

注意事项

1. 在穿戴的过程中，要注意避开手术部位。
2. 在穿戴上后，要将防护罩调整到合适的位置。
3. 使用本产品期间也要注意不要有过于激烈的运动。
4. 患者在排尿时打开防护罩，排尿后将防护罩罩回原处。
5. 使用产品期间注意保持产品的清洁，如果脏污请及时更换。
6. 产品仅供外部使用。
7. 本产品在使用后请丢弃，防止交叉使用可能导致的皮肤感染。

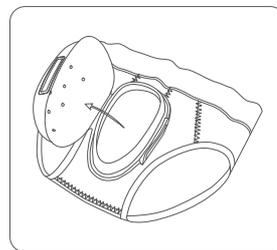

保护罩开启状态

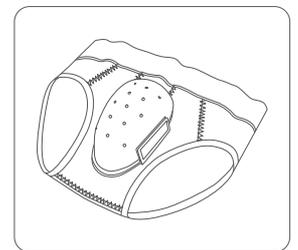

保护罩闭合状态

禁忌症

裤体接触到部位有感染性皮肤损伤、皮疹及肿瘤患者禁止使用。